



Vision  
■ LDL

TABLA DE COCCIÓN  
FIRING CHART



WOHLWEND AG CE 0483

## Tabla de Cocción Firing Chart

	Temperatura Inicio Start temperature	Secado Drytime	Calentamiento Heat rate	Temperatura Final Final temperature	Mantenimiento Hold time	Vacio Vacuum	Apariencia Appearance
Liner	450°C	2 Min	40°C/Min	755°C	1 Min	Si	Ligeramente brillante
Liner	842°F	2 Min	104°F/Min	1391°F	1 Min	yes	Slightly shine
Dentin 1	400°C	6 Min	40°C/Min	755°C	1 Min	Si	Ligeramente brillante
Dentin 1	752°F	6 Min	104°F/Min	1391°F	1 Min	yes	Slightly shine
Dentin 2	400°C	4 Min	40°C/Min	750°C	1 Min	Si	Ligeramente brillante
Dentin 2	752°F	4 Min	104°F/Min	1382°F	1 Min	yes	Slightly shine
Glasear con Glaze Glazing with glaze	450°C	2 Min	40°C/Min	740°C	1 Min	No	Brillante
	842°F	2 Min	104°F/Min	1346°F	1 Min	No	shiny
Glasear sin glaze Glazing without glaze	450°C	2 Min	40°C/Min	755°C	1 Min	No	Brillante
	842°F	2 Min	104°F/Min	1391°F	1 Min	No	shiny

Los parámetros de cocción dados anteriormente son orientativos, y siempre deben ajustarse al horno utilizado para la cocción y la situación del horno.

Lo importante es obtener el resultado de cocción correcto.

The firing parameters given above are guidelines, which always need to be adjusted to the furnace used for firing and the situation of the furnace.

The important thing is to obtain the right firing result.



Santo Domingo, 56 Local  
28917 La Fortuna - Leganes (MADRID)  
Tlfno.: +34-91-610-16-01  
[www.dentaltotal.es](http://www.dentaltotal.es) / [info@dentaltotal.es](mailto:info@dentaltotal.es)



Wohlwend AG  
Dental Manufaktur

Platta 52  
FL-9488 Schellenberg  
Phone: +423-373-4243  
Fax: +423-373-4244  
[www.wohlwend-ag.com](http://www.wohlwend-ag.com)  
[info@wohlwend-ag.com](mailto:info@wohlwend-ag.com)